


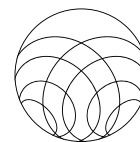

osseotouch
TOTAL CONTROL

SURGICAL PROTOCOL

Conex-K & Only One



osseotouch
TOTAL CONTROL

SURGICAL PROTOCOL

Conex-K & Only One





“Sette note, cinque
osteotomi e quattro
densità ossee...
Musica Maestro!”

Protocollo

Pratico e concreto

Un solido protocollo chirurgico che possa prendere in considerazione le varie configurazioni e morfologie ossee nella direzione della semplificazione. Dare la possibilità al clinico di una scelta chirurgica in piena libertà, preservando le strutture ossee o modificandole in base alle esigenze implantari.

Perchè Black Ruby?

La geometria di Black Ruby con punta a doppia conicità facilita l'ingresso all'interno dell'osso garantendo uno shaping d'eccellenza e preservando l'osso al 100%. Il rivestimento nero in DLC, oltre a renderli esteticamente accattivanti, aiuta lo scivolamento all'interno dell'osso riducendo l'attrito con esso.

La preparazione del sito implantare, mai come con Black Ruby, risulta semplice, predicibile e ripetibile.

QR code

Quote Black Ruby




Protocollo per impianti Conex-k e Only One

Conex - K


Osso D4 | Ø 3,3

BLACK - RUBY 1

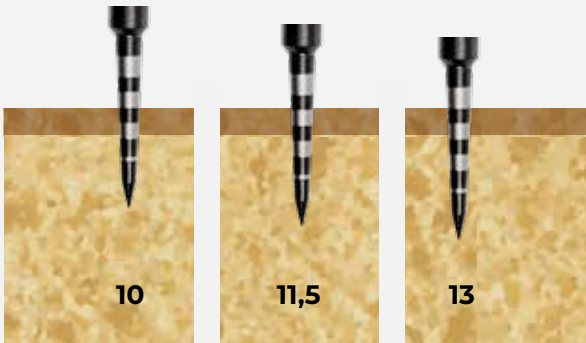


Osso D3/D2 | Ø 3,3

BLACK - RUBY 1
BLACK - RUBY 2

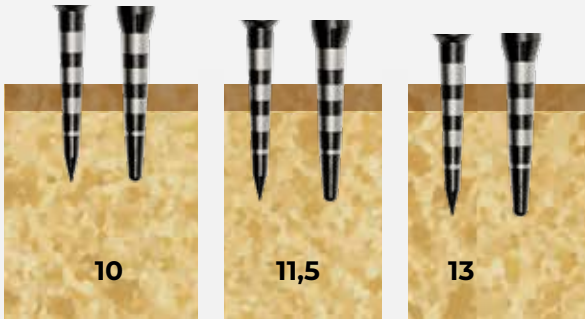


Osso D4 | Ø 3,75

BLACK - RUBY 1
BLACK - RUBY 2
BLACK - RUBY 3

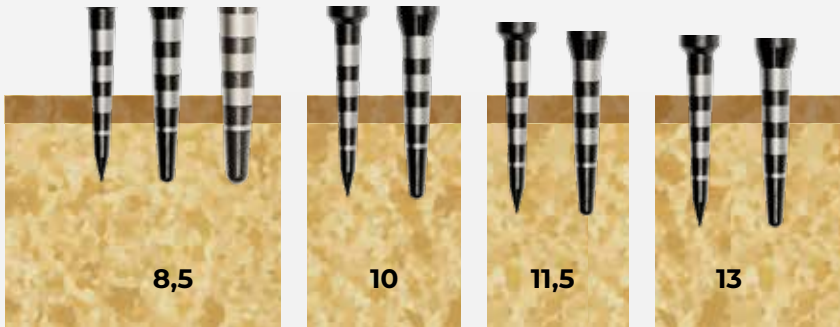


Osso D3/D2 | Ø 3,75

BLACK - RUBY 1
BLACK - RUBY 2
BLACK - RUBY 3
BLACK - RUBY 4

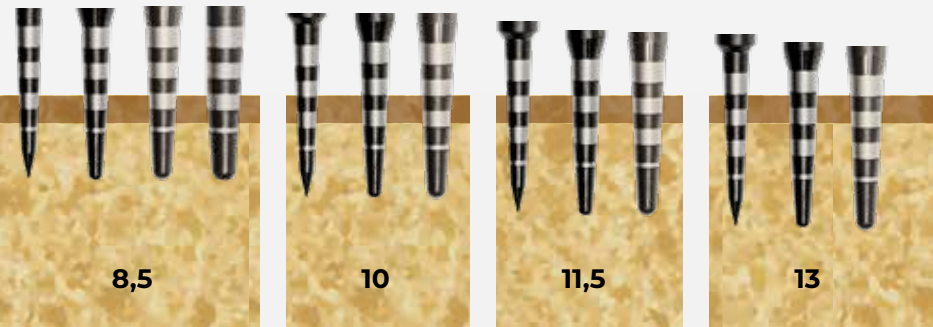


Osso D4 | Ø 4

BLACK-RUBY 1
BLACK-RUBY 2
BLACK-RUBY 3
BLACK-RUBY 4

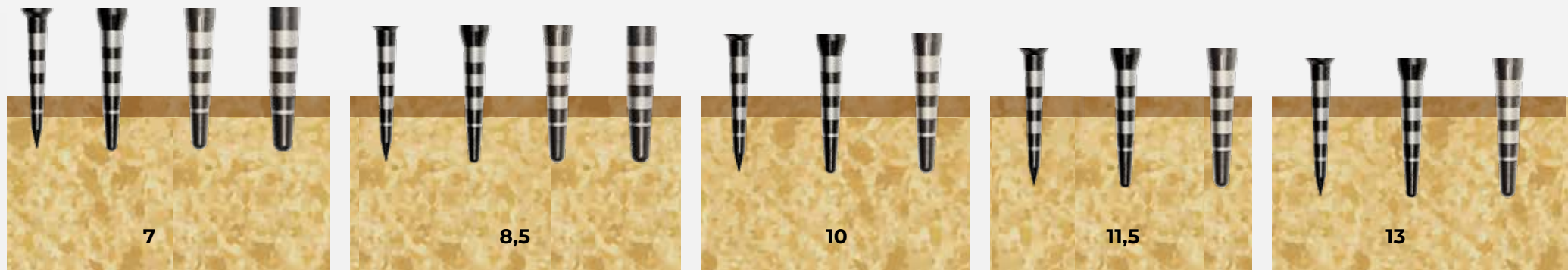

Osso D3/D2 | Ø 4,25

BLACK-RUBY 1
BLACK-RUBY 2
BLACK-RUBY 3
BLACK-RUBY 4
BLACK-RUBY 5

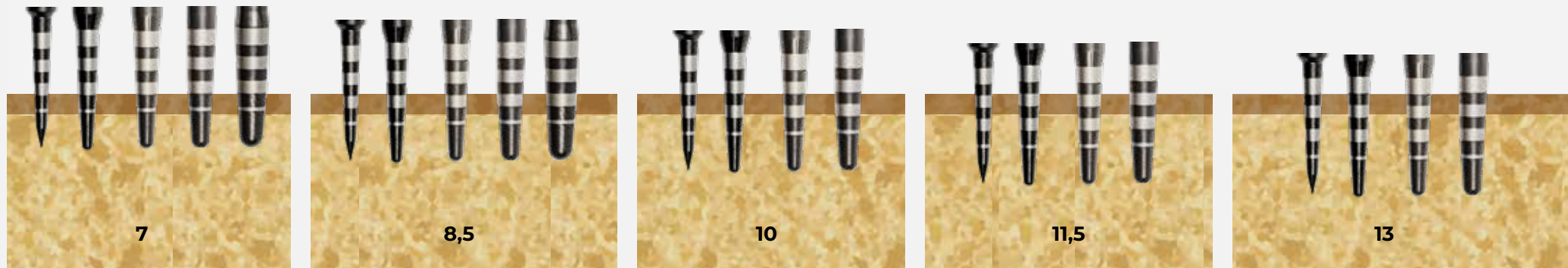

Osso D3/D4 | Ø 5



BLACK-RUBY 1

BLACK-RUBY 2

BLACK-RUBY 3

BLACK-RUBY 4

BLACK-RUBY 5

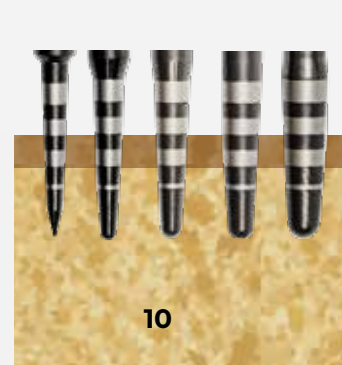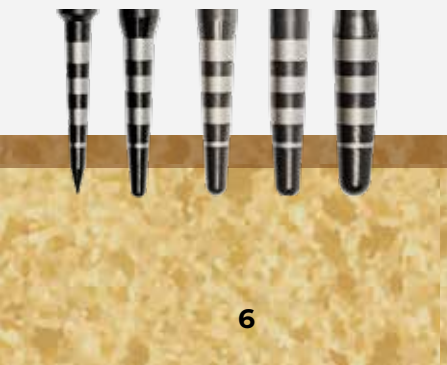


Protocollo in Osso D1 per impianti Conex-k e Only One

Conex - K


Osso D1 | Ø 3,3

- FRESA A LANCIA °
- FIRST
- FR2024
- FR2020
- CS-SP

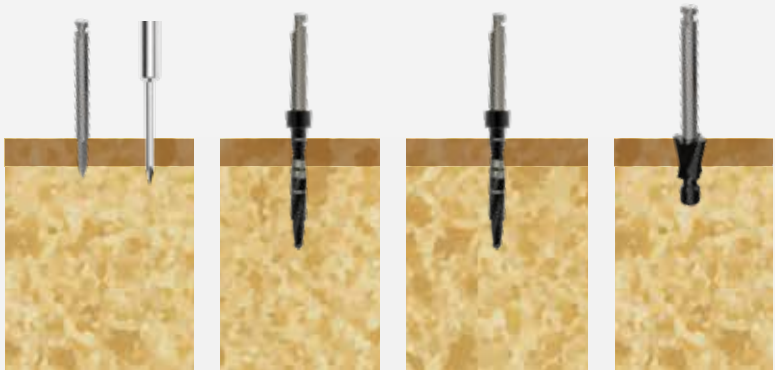

Osso D1 | Ø 3,75

- FRESA A LANCIA °
- FIRST
- FR2024
- FR2020
- FR2428
- CS-MP

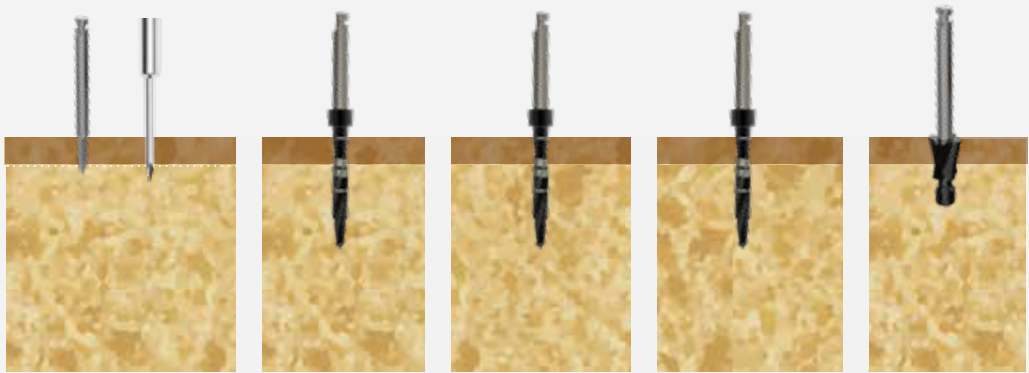

Protocollo in Osso D1 per impianti Conex-k e Only One

Conex - K


Osso D1 | Ø 4,25

- FRESA A LANCIA Ø
- FIRST
- FR2020
- FR2024
- FR2428
- FR2833
- FR3338
- CS-MP



Osso D1 | Ø 5

- FRESA A LANCIA Ø
- FIRST
- FR2020
- FR2024
- FR2428
- FR2833
- FR3338
- FR3844

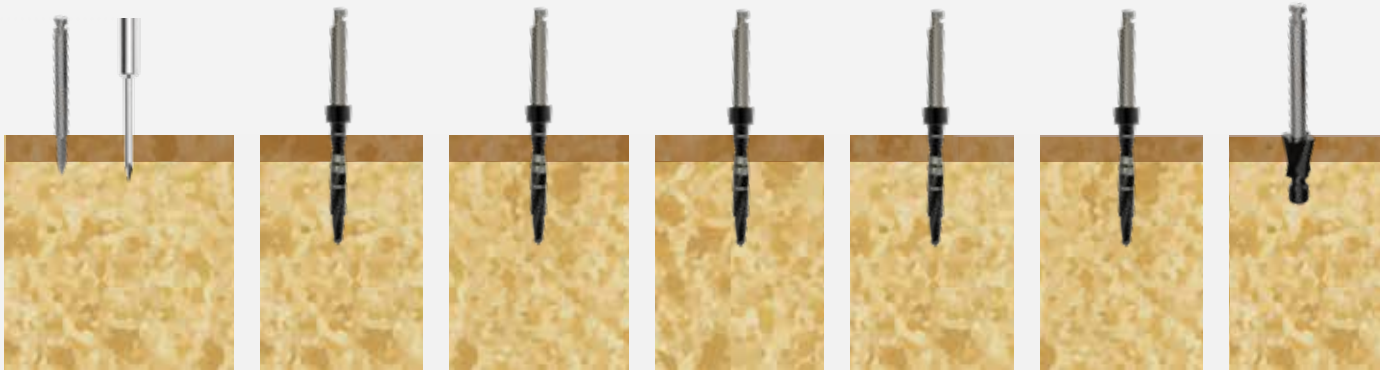


Protocollo per impianti Conex-k e Only One

Only One

Osso D4 | Ø 3,3

BLACK-RUBY 1

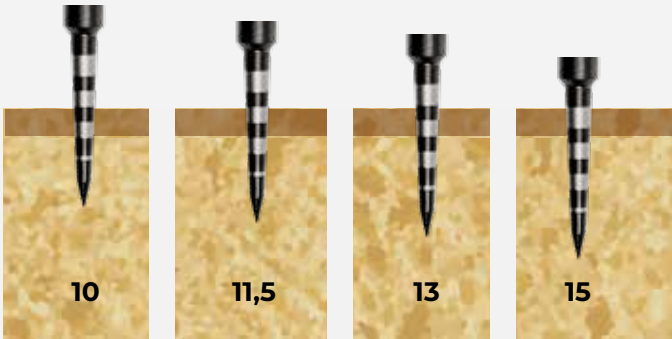

Osso D3/D2 | Ø 3,3

BLACK-RUBY 1

BLACK-RUBY 2



Osso D1 | Ø 3,3

FRESA A LANCIA Ø

FIRST

FR2024

FR2428




Protocollo per impianti Conex-k e Only One

Only One

Osso D4 | Ø 4

BLACK-RUBY 1
BLACK-RUBY 2

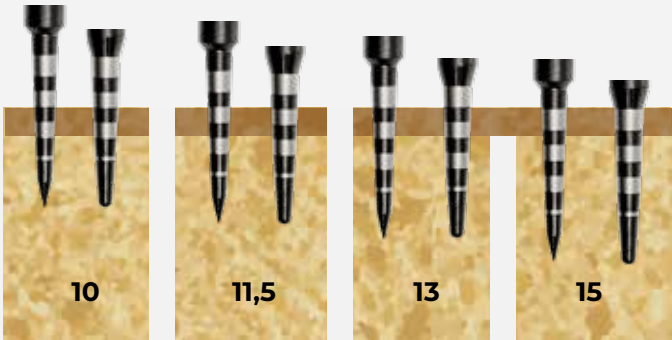


Osso D3/D2 | Ø 4

BLACK-RUBY 1
BLACK-RUBY 2
BLACK-RUBY 3



Osso D1 | Ø 4

FRESA A LANCIA Ø
FIRST
FR2024
FR2428
FR2833

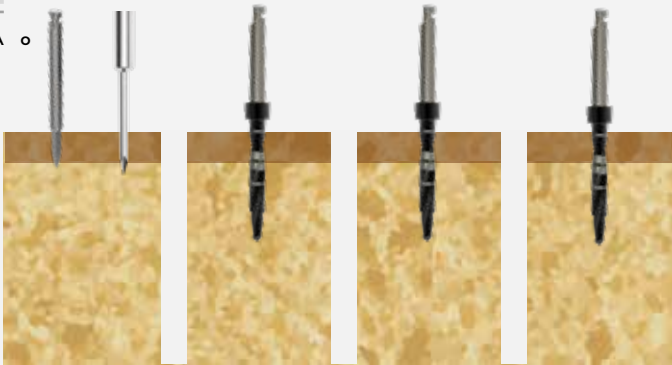

Contatti

www.osseotouch.com
contact@osseotouch.com
0331 15 35 586
329 744 3204

Indirizzi

DISTRIBUTORE ITALIA
OSNRGY S.r.l
Piazza Garibaldi 9
Gallarate (VA) 21013
Italia

Seguici su

